

# Extra instructie valdetector

Persoonsalarm



**Draag de zender 24 uur per dag, ook tijdens het douchen of in bed!**



## Alarm maken met de alarmknop

Druk de alarmknop 1 seconde in totdat deze begint te trillen. De meldcentrale krijgt uw alarm binnen, zij zien precies wie u bent en waar u woont. Indien nodig schakelen zij uw contactpersonen in en eventueel de hulpdiensten of 112. Er komt altijd hulp, ook als u niet meer kunt communiceren met de meldcentrale.



## Automatisch alarm

Mijn “valdetector” heeft een val geconstateerd. Wat nu? Als de “valdetector” een val heeft geconstateerd zal deze na 20 seconden gaan trillen en na nog eens ongeveer 20 seconden contact maken met de meldcentrale.

Legt u uw hand binnen deze eerste 40 seconden op de zender dan zal de “valdetector” zich automatisch resetten. Er wordt op dat moment geen alarm gemaakt. Heeft u toch hulp nodig dan kunt u natuurlijk altijd op de knop aan de bovenzijde drukken.



## Mijn “valdetector” gaat trillen?

Als uw “valdetector” gaat trillen wil dit zeggen dat hij een “val” heeft geconstateerd. Als u geen hulp nodig heeft kunt u dit alarm resetten door uw hand volledig op de zender te leggen en weg te halen zodra de zender is gestopt met trillen.



## Disclaimer

Deze valdetector is in de basis een reguliere zender met een extra functie. De valdetector is dan ook in veel gevallen geen vervanging voor handmatig alarmeren. Gaat het alarm niet trillen en heeft u toch hulp nodig, duw dan zelf op de knop. Wij kunnen niet verantwoordelijk gehouden worden als iemand gevallen is en dit niet gedetecteerd is.



## Vragen?

Indien u nog vragen heeft kunt u deze wellicht terugvinden bij “veelgestelde vragen” op [csipersoonsalarmering.nl](https://csipersoonsalarmering.nl). U kunt ook altijd naar onze Customer Care Center bellen of mailen.



Bij uw alarmtoestel ontvangt u een sticker die bij uw voordeur wordt geplakt. Zo zien ook kwaadwillenden dat u snel alarm kunt slaan.



## Customer Care Center

Telefoon: 088 027 40 00  
Email: [service@csiservice.nl](mailto:service@csiservice.nl)  
Website: [csipersoonsalarmering.nl](https://csipersoonsalarmering.nl)